

Type de Document	Protocole Ebola/Marburg	Statut	Final
Section	OCA, OCB, OCBA, OCG, OCP, WaCA, Ubuntu	Langue	Français
Auteurs	Groupe de biosécurité des maladies à filovirus	Dernière révision	05/2026
Approbation DirMed	Daniela Garone, Matthew Coldiron (Dirmed adjoint délégué)	Approuvé	25/05/2026

SOP Nettoyage et de désinfection d'équipements de protection individuelle réutilisables

A. Exigences de sécurité et principes clés :

- Cette procédure ne s'applique qu'aux EPI réutilisables, les EPI à usage unique tels que le masque FFP2/N95 doivent être jetés immédiatement après utilisation
- L'hygiène des mains doit toujours être réalisée avant de mettre et après avoir retiré les gants (de ménage en caoutchouc).
- Évitez de secouer ou de manipuler excessivement les EPI afin de minimiser la contamination environnementale.
- Faites toujours *le nettoyage avant la désinfection*.
- Les EPI réutilisables doivent être pré-désinfectés dès leur retrait, puis envoyés à la zone de lavage pour traitement
- Le matériel doit être collecté et transporté vers la zone de lavage désignée dans des contenants fermés et étanches.
- Les zones sales et propres doivent rester physiquement séparées tout au long du processus de traitement.
- Les procédures standards de PCI pour le traitement régulier du linge hospitalier doivent être respectées en permanence.
- Le personnel impliqué dans les activités de buanderie doit être formé aux précautions PCI et aux procédures de manipulation sécurisée du linge

B. Équipe responsable : Personnel dans la zone à haut risque au poste de déshabillage et agent de buanderie

C. Matériaux nécessaires :

Dans la zone à haut risque

- Solution chlorée 0,5 %

Dans la zone de lavage

- Tuniques, bottes, lunettes, N95/FFP2, tabliers, gants de protection réutilisables
- Produits de nettoyage – des fournitures dédiées doivent être mises à disposition, en quantité suffisante

D. Procédure

1) Pre-désinfection (après déshabillage)

- **Remarque :** Comme les lunettes peuvent être endommagées par un temps de contact prolongé, la recommandation suivante a été faite.
 - Lunettes de protection (1 trempage) non rincées en *solution chlore 0,5 %*

Articles à pré-désinfecter

- **Lunettes de protection si** (visiblement souillées ou ont été exposées par contact en zone à haut risque)
- **Bottes/gants/tabliers**
- *Solution chlorée 0,5 %* (temps de contact de 5 minutes)

2) Désinfection (dans la buanderie)

Procédure : (après la pré-désinfection)

- Lavez-les avec du savon et de l'eau. Utilisez une brosse à récurer pour les bottes.
- Rincez à l'eau claire
- Faites tremper dans une solution de chlore à 0,1 % pendant 10 minutes. (un seau de 60 litres, peut contenir environ 8 kg de linge). Jetez la solution après utilisation
- Rincez à l'eau claire
- Vérifiez l'état des bottes et des gants : repérez les trous et assurez-vous de leur intégrité. Mettez de côté les bottes et les gants endommagés pour les remplacer et les détruire.
- Séchez au soleil quand c'est possible
- Organisez les bottes et gants par paires et par taille.
- Une fois sèches, apportez les bottes dans le vestiaire du personnel.
- Apportez gants et tabliers dans la zone d'habillage.

TO CLEAN BOOTS, CROCS, APRONS, AND GLOVES:			
(After pre-disinfection)			
1	Wash with soap and water. Use a scrubbing brush for boots.		
2	Rinse with clean water.		
3	Soak in 0.1% chlorine solution for 5 minutes . (1 use solution)		
AFTER SOAKING:			
4	Rinse with clean water.		
5	Check boots and gloves for holes. Separate any damaged boots and gloves for replacement and destruction.		
6	Dry in the sun.		
7	Once dry, organize boots, clogs and gloves in pairs and by size.		
8	Send the clogs to <u>staff</u> changing room.		
9	Send the gloves, boots and aprons to the donning area.		

Procédure : (après la pré-désinfection) pour les Lunettes

- Lavez les lunettes avec de l'eau et du savon
- Rincez délicatement avec de l'eau claire
- Faites tremper dans une solution de chlore à 0,1 % pendant 5 minutes.
- Rincez délicatement à l'eau claire pour éviter les griffures.
- Séchez au soleil face vers le haut.
- Vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées avant de les amener dans la zone d'habillage.
- Apportez-les à la zone d'habillage. Le personnel entrant dans la zone à haut risque doit vérifier à nouveau la taille, tester l'ajustement, l'état de l'élastique et de l'écran de protection avant de les enfiler.

TO CLEAN GOGGLES: (After pre-disinfection)		
1	Carefully wash the goggles with a soft cloth in soapy water.	
2	Rinse with clean water.	
3	Soak in 0.1% chlorine solution for 5 minutes. (1 use solution)	
4	Rinse with clean water x 3 times in clean water.	
5	Dry in the sun.	